

Le collecteur à aiguilles

Bien utilisé, risque AES maîtrisé !



L'installer sur un plan stable
à portée de mains
<50 cm du soignant



Éliminer directement
l'aiguille
sans dépose intermédiaire



Ne pas se déplacer avec
une aiguille usagée
à la main



Enclencher la
fermeture temporaire
entre 2 utilisations



Enclencher la fermeture
définitive
dès que la limite de remplissage est atteinte



Stocker le déchet
dans un lieu dédié



Éliminer le collecteur
dans la filière DASRI



Vacciner en toute sécurité – mars 2021